


アイ・エイ・ティー エグザ・プラス

IAT EXA PLUS

IMPLANT SYSTEM

ストップードリル

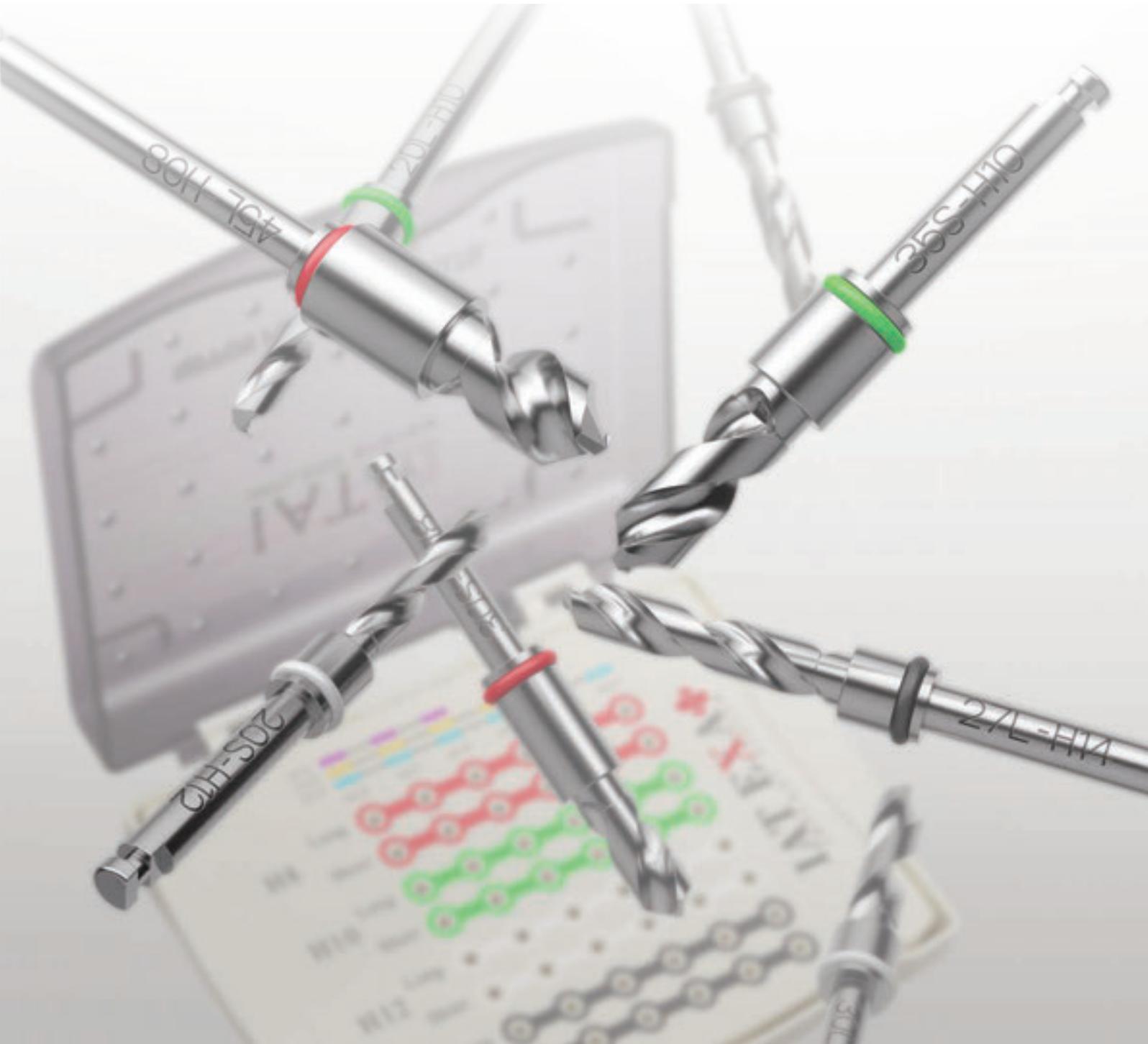

IAT EXA PLUS ストッパードリル

IAT EXA PLUSでは、特徴である

- ドリルの切れ味を最大限に引き立てること
- 安全に骨形成をおこなっていただくこと
- 安心してストレスなく骨形成をおこなっていただくこと

を目的としてストッパードリルを開発いたしました。

ストッパードリルについて

IATのストッパードリルは

- ドリルストッパー装着の手間を省くこと
- つけ間違いを防ぐこと

を目的として、各ドリルにストッパーが一体形成されております。

各ドリルはショートタイプおよびロングタイプをご用意いたしましたので、症例に合わせてご選択いただけます。

また、長径に対応した色分けをおこなっておりますので、長径の識別やサージカルトレーに戻す際に役立ちます。

(ドリルネック部に色分けされたリングが付いております。)

ショートタイプとロングタイプ

〈H8~H12〉



〈H14〉



長径を示す色分け

H8 赤



H10 緑



H12 白




H14 黒



販売名: ストッパードリル
 一般的名称: 手術用ドリルビット
 分類: 一般医療機器
 届出番号: 09B1X10003000008

各直径と長径のフロー

※骨がフラットではない場合、高い位置の骨にストッパー部分が接触し所定の深さまで形成できないことがあります。
 この時はストッパー無しのドリルをご使用ください。

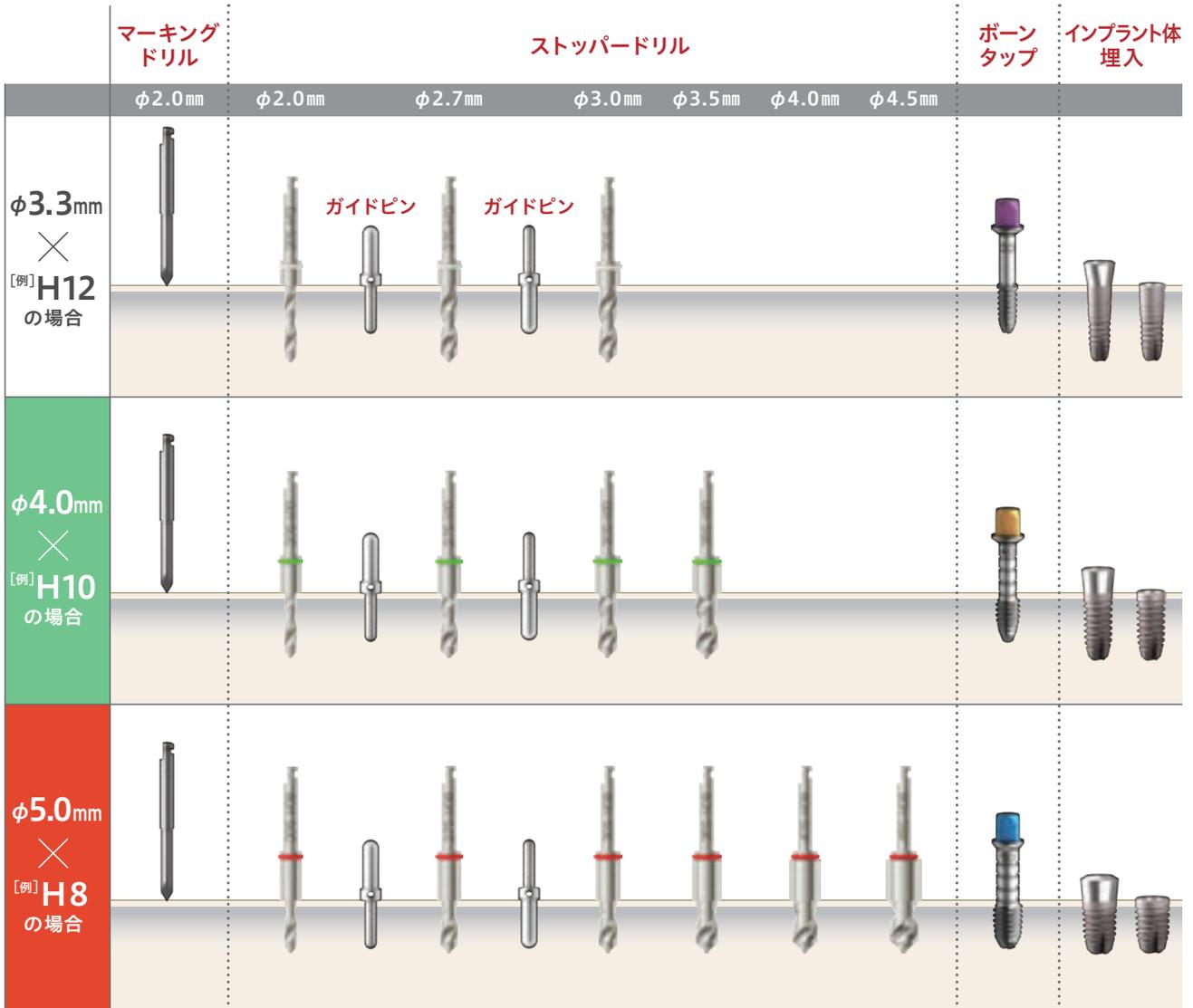

サージカルトレイ

全ての規格に対応したドリルを収納できる
 サージカルトレイをご用意しております。





製造販売元

日本ピストンリング株式会社

新製品事業開発部 インプラントグループ

〒329-0114 栃木県下都賀郡野木町野木1111 Medical Device Center

 0120-677-344  0280-33-3676

<https://www.iatimp.com/>

202008.1000.DNP

